

DENTIRO® Zero - Účinná dezinfekce, bez alkoholu

- Bez alkoholu, aldehydů a barviv
- Výborná snášenlivost s materiály
- Krátká doba expozice, včetně účinků na polyomaviry

DENTIRO® Zero je bezalkoholový, hotový roztok pro rychlou dezinfekci a čištění neinvazivních lékařských nástrojů s citlivým povrchem jako břišní a vaginální ultrazvukové sondy, infuzní pumpy, odsávačky a nástroje zhotovené z přírodní nebo umělé kůže, gumy, akrylátového skla nebo jemného plastu. Kromě toho, že neobsahuje alkohol, neobsahuje **DENTIRO® Zero** ani aldehydy nebo fenoly, které mohou vyvolávat zdravotní rizika. **DENTIRO® Zero** účinně inaktivuje v průběhu 60 sekund bakterie (včetně MRSA), vegetativní kvasinky (bez spor) a obalené viry.

Aktivní sloučeniny **DENTIRO® Zero** se neodpařují a tím redukuje rekontaminaci povrchů. Díky inovativní receptuře kombinuje **DENTIRO® Zero** výborné antimikrobiální účinky s vynikajícími čistícími vlastnostmi.

Návod k použití:

Dezinfikované povrchy kompletně navlhčete a roztok nechte působit podle doby expozice. Pokud je potřeba, povrchy a nástroje pak osušte měkkou utěrkou. Pravidelně dezinfikované ultrazvukové sondy otřete jednou denně mokrou utěrkou, aby se na nich nehromadily biocidy.

Aplikační vlastnosti:

Rychlá dezinfekce a čištění lékařských nástrojů s citlivým povrchem: břišní a vaginální ultrazvukové sondy, infuzní pumpy, odsávačky a nástroje z přírodní nebo umělé kůže, gumy, akrylátového skla, jemného PVC.

Upozornění:

Žádná

Velikost balení:

1 litr, 5 litrů

Spektrum účinnosti / Doba expozice:

Baktericidní (1)	60 sekund
MRSA (2)	60 sekund
Fungicidní (C.albicans) (1)	60 sekund
Obalené viry (vč. HBV, HIV) (3)	60 sekund
Vaccinia virus	60 sekund
BVDV / Hepatitida C (4)	60 sekund
Polyomavirus (SV 40)	60 sekund
Rotavirus	60 sekund

- 1) DGHM standardní metody pro dezinfekci nástrojů včetně testů v praxi;
 - 2) Methicilin-rezistentní Staphylococcus aureus;
 - 3) Kombinované testy na virus vakcinie / zástupný virus BVDV podle směrnic RKI / DVV;
 - 4) BVDV - zástupný virový test;
- Vyhovující DGHM směrnícím a EN 1040, EN 1275, EN1276, EN 1650, EN 13697; a RKI/DVV směrnícím

Složení ve 100g: 0,4g benzalkonium chloride, 0,4g N-alkylaminopropyl glycine